

BREAST ICING

Cofanetto crioterapico per la chirurgia della mammella

VANTAGGI DELLA CRIOTERAPIA

- Sollievo immediato dal dolore
- Limita sanguinamenti e ematomi
- Consente la gestione dell'edema postoperatorio
- Facile da utilizzare a domicilio
- Facile pulizia



La crioterapia offre dei vantaggi nel recupero postoperatorio della chirurgia della mammella. L'azienda Body Icing ha progettato e prodotto Breast Icing, un dispositivo di facile utilizzo che consente l'applicazione del freddo sull'area chirurgica al fine di ridurre il dolore, il gonfiore e il sanguinamento.

Dona sollievo dal fastidio e coadiuva la gestione del dolore consentendo di ridurre l'uso di analgesici.

Breast Icing genera un'azione mirata e può essere utilizzato a domicilio o in viaggio, permettendo alle pazienti di partecipare attivamente al processo di guarigione. Le sue caratteristiche ergonomiche fanno sì che questo dispositivo ottimizzi il recupero, rendendolo uno strumento prezioso per le pazienti sottoposte a chirurgia della mammella.



« La nostra soluzione
rivoluzionaria per
vincere il dolore ! »



Breast Icing è un dispositivo crioterapico progettato per favorire il recupero postoperatorio della chirurgia della mammella. È costituito da un set di 2 impacchi freddi specificamente sviluppati per adattarsi perfettamente alla forma del seno, garantendo una distribuzione ottimale del freddo.

Il freddo applicato sulla zona sensibile allevia il dolore e aiuta a ridurre il gonfiore.

Prodotto in Europa



Consigli per l'uso:

20 min per seduta ogni 4 ore.

Prima seduta in sala operatoria dopo la medicazione.



Dispositivo Medico



Conforme ai requisiti dell'Unione Europea

FACILE DA USARE A DOMICILIO

Breast Icing rappresenta il massimo del comfort per le pazienti. Progettato per un utilizzo semplice, consente alle pazienti di applicare autonomamente il freddo senza difficoltà, in ospedale o a domicilio, assumendo in questo modo il controllo della gestione del dolore durante il percorso di guarigione. Favorendo l'autonomia, l'utilizzo intuitivo di Breast Icing contribuisce al miglioramento del benessere generale della paziente.



INDICAZIONI

Chirurgia unilaterale o bilaterale della mammella, riduzione, aumento (protesi e/o grasso), ricostruzione (tranne che nei lembi liberi quali Diep, Gracilis, Pap) e a seguito di ablazione parziale (tumorectomia) o totale (mastectomia), lembi pedunculati. Mastodinie nella mastopatia fibrocistica e/o premenstruale, ingorgo mammario, infezioni mammarie (in aggiunta al consueto trattamento antibiotico e locale).

Intervento di ginecomastia con o senza liposuzione periferica.

CONTROINDICAZIONI

Ricostruzione mammaria a lembo libero (Diep, Gracilis, Pap), ricostruzioni microchirurgiche, crioglobulinemia, allergia al freddo, insensibilità al freddo, arterite, diabete.

ISTRUZIONI




Prima dell'uso, gli impacchi freddi devono essere messi in congelatore per almeno 2 ore.

La fascia dorsale va posizionata piatta, con le chiusure in velcro verso l'alto. La paziente vi si sdraia sopra.



La paziente pone gli impacchi freddi sul seno. Poi unisce insieme i 2 impacchi sul davanti.

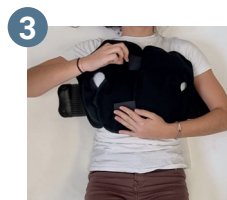

La paziente fissa i velcro della fascia dorsale su ciascun impacco freddo. È possibile regolare la chiusura adattandone il fissaggio tra i 2 impacchi freddi.

La seduta di crioterapia di 20 min può iniziare.



L'ideale è che Breast Icing venga utilizzato in posizione sdraiata onde evitare lo spostamento degli impacchi freddi.

BREAST ICING - Cofanetto crioterapico per la chirurgia della mammella

Rif. EST60-SEIN



Impacco freddo per il seno sinistro



Impacco freddo per il seno destro



Fascia dorsale in velcro



Estensione



Valigetta di trasporto

Body Icing

27 rue Jacques Lemercier - 78000 Versailles - France
Telefono : +33 801 790 000 - Email : contact@bodyicing.com
SIRET : 92240668100010 / VAT : FR78922406681

Distribuito da :