

# BladeFlask<sup>®</sup>EVO

100 | Skalpellingentferner

Der erste Einhand-Skalpellingentferner der Welt wurde entwickelt.



[www.licksmart.com](http://www.licksmart.com)

 **CLICKSMART<sup>®</sup>**  
... and be safe

# Eine Aktualisierung des Weltstandards bei Einhand-Skalpellklingentfernern.

Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem Skalpell zu schneiden, sechsmal höher ist als die von Nadelstichverletzungen<sup>1</sup>. Bedauerlicherweise haben viele Anwender und Klinikverwalter die Wahrscheinlichkeit dieser Verletzungen unterschätzt<sup>2</sup>. Diese Schnitte können jeden treffen, auch Sie, unabhängig davon, wie erfahren Sie im Umgang mit Skalpellen sind, und sie können zu Infektionen, durch Blut übertragbaren Krankheiten und psychischen Problemen führen. Schlimmer noch: Schwere Verletzungen können einen mikrochirurgischen Eingriff erfordern, um Arterien, Nerven und/oder Sehnen zu reparieren.

Der **Qlicksmart BladeFlask EVO** kann mehrere Arten von #3 und #4 Griffen aufnehmen, die den internationalen Herstellungsstandards entsprechen. Dazu gehören grosse Autopsieskalpelle, sechseckige, Barron-, bauchige, dicke und runde Griffe sowie die neuen ergonomischen Griffe, die dem Anwender eine grössere Freiheit bei der Verwendung jedes gewünschten Skalpells geben. Zusätzlich zu den Standard-Skalpellklingen kann der BladeFlask EVO auch Spezialklingen wie #60 und #70 aufnehmen. Er lässt sich ganz einfach mit nur einer Hand bedienen. Erleben Sie Sicherheit mit dem neuen Standard für die Entfernung von Skalpellklingen.

Die BladeFlask EVO lässt sich mit nur einer Hand bedienen und erleichtert so die Einhaltung der OSHA-Norm 1910.1030 zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gesundheitsgefahren durch blutübertragbare Krankheitserreger und anderen Verletzungen.



Qlicksmart-Klingentferner haben über 70 Millionen kontaminierte Skalpellklingen sicher entfernt und damit weltweit bis zu 150'000 Verletzungen verhindert.



Er ist einfach zu bedienen, mit einer schnellen „Platzieren, Stossen, Klicken und Ziehen“-Aktion. Diese benutzerfreundliche Lösung ist auch eine kostengünstige Alternative zu Sicherheitsskalpellen oder Einwegskalpellen.



Die Einhandklingentferner von Qlicksmart erfordern nur wenig oder gar keine Schulung und verringern nachweislich zuverlässig das Risiko von Verletzungen durch Skalpellklingen.



**BladeFlask<sup>®</sup> EVO**  
100 | System zur Entfernung von Skalpellklingen

**QLICKSMART<sup>®</sup>**  
...and be safe

# Spezifikationen

Farbversionen	Rot - USA Gelb - International
Produkt-Code	US - QBVRGEN International - QBVYGEN UK - QBVYUKGE
GMDN-Code	46235
Klingenkapazität	100 Klingen - der BladeFLASK schliesst sich automatisch, wenn die maximale Kapazität erreicht ist.
Kompatible Klingen und Griffe	Alle handelsüblichen Skalpellklingen, einschliesslich (aber nicht beschränkt auf) bis zur Grösse PM60A, PM60B, PM70. Alle im Handel erhältlichen Skalpellgriffe, einschliesslich (aber nicht beschränkt auf) PM6, PM8; Barron-Griffe, dicke bauchige Griffe, ergonomische Griffe
Inkompatible Klingen und Griffe	Beavergriffe und Einweggriffe
Grösse (pro Einheit)	9cm x 13.4cm x 11.3cm
Gewicht (pro Einheit)	250g
Zubehör	Halterung - hält den BladeFlask EVO in seiner Position, damit die Klinge mit einer Hand entnommen werden kann.
Material	Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Mechanismus: ABS + Edelstahl

Methode der Entsorgung	Erfüllt die Norm AS 3825:2020 (Verfahren und Vorrichtungen für die Entfernung, Eindämmung und Entsorgung von Skalpellklingen aus Skalpellgriffen). Er entspricht den UN-Transport-Empfehlungen für gefährliche Güter. Das Logo für infektiöse Substanzen auf dem Frontetikett und die korrekte Farbe des Behälters für scharfe/spitze Instrumente ermöglichen die Entsorgung als medizinischer Abfall. Bitte befolgen Sie die in Ihrer Einrichtung geltenden Verfahren für die Entsorgung von medizinischem Abfall. Zu entsorgen als Behälter für scharfe/spitze Gegenstände zum einmaligen Gebrauch.
Regulatorische Informationen	Australien - Aufgeführt unter TGA ARTG Nr.: 146821 USA - FDA 510(K) premarket cleared #K213274 als Behälter für scharfe Gegenstände. Europa - Medizinprodukt der Klasse I gemäss EU MDR 2017/745 und CE-gekennzeichnet. UK - Medizinprodukt der Klasse I gemäss UK MDR 2002 und UKCA-gekennzeichnet Konform mit ISO 23907-1:2019 (Schutz vor Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil I Behälter für scharfe/spitze Instrumente zum einmaligen Gebrauch)

## Anwendung



### BEFESTIGUNG AN DER WAND ODER AM WAGEN:

- Wenn Sie Ihren BladeFlask EVO noch nicht montiert haben, bereiten Sie die Universalhalterung\* vor.
  - HALTERUNG HAT DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AN DER UNTERSEITE
  - ODER SCHRAUBEN VERWENDEN.

\* Siehe Montageschablone und Anweisungen in der Verpackung der Halterung.
- BladeFlask EVO kann an einer Wand, auf einem Wagen oder einer Bank montiert werden.
 

NACH UNTEN IN DIE HALTERUNG SCHIEBEN

NACH HINTEN IN DIE HALTERUNG SCHIEBEN

HINWEIS: BladeFlask EVO muss während des Gebrauchs auf der Montagehalterung befestigt werden.

### KLINGE MIT EINER HAND ENTFERNEN:

- Legen Sie die Klinge mit der scharfen Kante nach rechts (oder mit der Lasche nach oben) auf die Landefläch
- Schieben Sie den Skalpellgriff entlang der Rampe nach oben in die BladeFlask EVO, bis Sie ein Klicken hören.
 

CLICK!
- Entfernen Sie den Griff.
 

HINWEIS: BladeFlask EVO wird als medizinischer Abfall entsorgt, nachdem sich der Zähler bei Erreichen der vollen Kapazität automatisch abgeschaltet hat.


1. A. Wong, H. Nguyen, R. Eley, M. Sinnott, "Purchase data: a proxy for safety status," *Journal of Hospital Infection*, Volume 105, Issue 4, 2020, Pages 657-658, ISSN 0195-6701, <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.05.004>.  
2. Kerr HL, Stewart N, Pace A, Elsayed S. (2009). "Sharps injury reporting amongst surgeons." *Ann R Coll Surg Engl*. 91(5):430-432.

## Andere Qlicksmart Produkte

BladeFLASK  
Skalpellingentferner




BladeCASSETTE  
Steriler Skalpellklingentferner

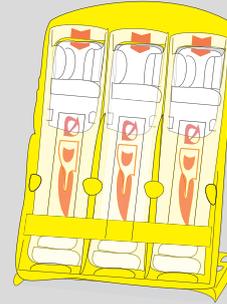

SnapIT und SnapIT Lite Ampullenöffner



BladeNeedleSYSTEM  
Steriler 2-in-1 Nadelzähler & Klingentferner

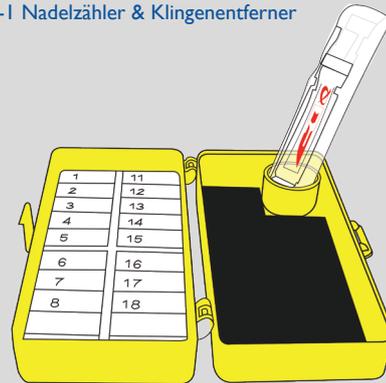

CheckCLIP Medikationsidentifikation



## Über Qlicksmart

Qlicksmart Pty Ltd hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von medizinischem Fachpersonal einfacher und sicherer zu machen, damit sie sich auf die Patientenpflege konzentrieren können. Qlicksmart wurde 1999 von zwei australischen Ärzten gegründet, um Schnittverletzungen durch Skalpelle in Krankenhäusern zu bekämpfen. Heute werden unsere preisgekrönten Sicherheitsgeräte in über 50 Ländern weltweit eingesetzt. Qlicksmart arbeitet mit Innovatoren aus dem Gesundheitswesen zusammen, um Lösungen für die übersehenen Probleme von Krankenschwestern, Chirurgen und Gesundheitseinrichtungen anzubieten. Wenn Sie mehr über die Sicherheitsgeräte von Qlicksmart erfahren möchten, besuchen Sie bitte [www.qlicksmart.com](http://www.qlicksmart.com) oder bitten Sie Ihren Händler noch heute um eine Vorführung.

### Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street  
West End, Brisbane  
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com  
www.qlicksmart.com



Suchen Sie „qlicksmart“  
und bleiben Sie in  
Verbindung.



Scannen Sie den  
QR-Code, um  
mehr über den  
BladeFLASK zu  
erfahren.



Vertrieben durch: